

# ClearView **TOTAL**

## Histerectomía Laparoscópica

Optima visualización  
Completo control del útero

**ClearView TOTAL** es un dispositivo de un solo uso, que permite la manipulación del útero, y define claramente donde hacer la incisión de colpotomía. En adición a las características del tradicional **ClearView**, el nuevo **ClearView TOTAL**, incluye un balón de oclusión y 3 copas de diferente tamaño, convenientemente empaquetadas en una bandeja estéril incluida en el interior del envase, para ser usadas en el momento necesario. Las copas mejoran la visibilidad durante la inserción y están coloreadas para fácil identificación cuando se realiza la incisión de colpotomía.

**ClearView TOTAL** está diseñado principalmente para procedimientos de laparoscopia en general, y específicamente para Histerectomía Total Laparoscópica.



### [Ref. de Producto](#)

UM750 Manipulador Uterino ClearView TOTAL. Punta 7cm. 5uds./C  
UM950 Manipulador Uterino ClearView TOTAL. Punta 9cm. 5uds./C

(No aparece en la imagen pero incluido en el kit: Jeringa de 60ml. para rellenar el balón de oclusión y sonda dilatador desechable).

## ¿Por qué elegir ClearView TOTAL?

### \*Usar cualquier escalpelo:

Cada **ClearView TOTAL** incluye 3 diferentes copas de colpotomía (3, 3.5, y 4cm.), para todas las medidas necesarias. Las copas, de material plástico coloreado en azul, resisten uso de electrocirugía ó escalpelo.

3 Medidas

- 3cm.
- 3.5cm.
- 4cm.



### \*Mantiene Neumoperitoneo:

El balón de oclusión actúa como sello, previniendo la pérdida del neumoperitoneo, una vez que se ha realizado la incisión de colpotomía.



### Completamente desechable

- No reciclado
- No esterilización
- No contaminación cruzada



### Mayor ángulo de Movimiento:

120°/90°



## ClearView TOTAL. Ventajas:

### Las copas de Colpotomía, son compatibles con cualquier escalpelo:

Cada **ClearView TOTAL**, incluye 3 diferentes tamaños de copa (3, 3.5 y 4cm.) para Colpotomía, con objeto de asegurar, que el tamaño adecuado está disponible. Están fabricadas con un material plástico resistente, que a diferencia de otras copas, puede ser usada con electrocirugía ó escalpelo. Están diseñadas con 4 huecos que mejoran la visibilidad durante la inserción, y están coloreadas en azul para fácil identificación cuando se hace la incisión de colpotomía.



## Mantenimiento del Pneumoperitoneo:

El balón de oclusión situado en la zona distal del manipulador, evita la pérdida de aire insuflado, una vez que se ha realizado la incisión de colpotomía. Se rellena con 60-120cc. de solución salina estéril mediante la jeringa de 60cc. incluida.



## El mayor rango de movilidad & punta con longitud añadida:

El pivote en la punta del manipulador, incrementa la movilidad y visibilidad. **ClearView TOTAL** proporciona un ángulo de articulación de 210°. El espaciador de 1cm incluido, proporciona dos longitudes para la punta en cada instrumento.



## Posición óptima del paciente:

El mango de control rotatorio, puede moverse con una mano, permitiendo al cirujano manipular el útero a través del paño quirúrgico sin romper la barrera estéril. El punto saliente en el mango, permite saber al cirujano en qué dirección está posicionada la punta. El diseño, también permite a la paciente permanecer en posición supina.



Product Number / Order Information		
UM 750	ClearView TOTAL Uterine Manipulator - 7cm Tip	5/box
UM 950	ClearView TOTAL Uterine Manipulator - 9cm Tip	5/box

Distribuido por:

**MEDICAL SELECTION S.L.**

C/ Trueba y Fernández, 6 (Local)

28016 Madrid (Spain)

Tel.:++34 91 350 0202

Fax:++34 91 350 0450

e-mail: [medical.selection1@gmail.com](mailto:medical.selection1@gmail.com)

Web: [www.medicalselection.com](http://www.medicalselection.com)

